

Kryteria przyjęcia próbek do Pracowni Wirusologicznej

Badanie w kierunku wścieklizny
Materiał do badania: – całe zwłoki, w przypadku małych zwierząt, – głowa, w przypadku dużych zwierząt. W przypadku dodatkowych badań w kierunku BSE dotyczących bydła – głowa zwierzęcia z kolczykiem identyfikacyjnym. Transport: – materiał w miarę możliwości świeży, dostarczony bezpośrednio do laboratorium po jego pobraniu, – materiał szczelnie zapakowany, zabezpieczony pod względem epizootycznym i oznakowany, – schładzanie materiału zaleca się jedynie w sytuacji transportu w wysokiej temperaturze i/lub na duże odległości, – zamrażanie materiału dopuszcza się jedynie w przypadku niemożności dostarczenia materiału bezpośrednio po pobraniu. Do próby należy dołączyć pismo przewodnie
Badanie monitoringowe wścieklizny:
Materiał do badania od lisów wolno żyjących: – surowice/płyny z jam ciała – klarowne, dopuszcza się hemolizę nieznaczного stopnia, – próbki kości – prawa lub lewa gałąź żuchwy od spojenia żuchwowego do stawu lub kość ramienna lub piszczelowa. Transport: – materiał szczelnie zapakowany, zabezpieczony pod względem epizootycznym i oznakowany, – materiał transportowany w miarę możliwości w warunkach chłodni. Do próby należy dołączyć listę zawierającą zestawienie próbek surowic/płynów z jam ciała i próbek kości (np. nr próbki, data odstrzału lisa, wiek/płeć, powiat, gmina, miejscowość).
Badanie w kierunku choroby mętwikowej bydła
Materiał do badania: – wypłuczyny z worka napletkowego buhaja lub popłuczyny z pochwy samicy. Transport: buteleczki szklane, szczelnie zamknięte, z podłożem transportowym, na które pobrano próbkę (podłoże transportowe wcześniej odebrane z Pracowni Pożywek ZHW w Bydgoszczy). Próbki należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie od pobrania, wskazany kontakt z pracownią (tel. 52 339 82 19) w celu ustalenia terminu dostarczenia/badania. Do próby należy dołączyć listę zawierającą numery ewentualnie nazwy badanych zwierząt.
Badanie koncentracji, morfologii, spermogram
Materiał do badania: – nasienie od wszystkich gatunków zwierząt Transport: szczelnie zamknięte probówki z nasieniem opisane z numerem z listy badanych zwierząt. Próbki należy dostarczyć w jak najkrótszym czasie od pobrania. Do próby należy dołączyć listę badanych zwierząt zawierającą numery np. kolczyka.
Badania anatomopatologiczne (sekcyjne):
Materiał do badań: – zwłoki wszystkich gatunków zwierząt (przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). Transport: – materiał dostarczony możliwie w jak w najkrótszym czasie po śmierci zwierzęcia, – materiał szczelnie zapakowany, zabezpieczony pod względem epizootycznym i oznakowany, – dopuszcza się w szczególnych przypadkach zamrożenie materiału. Do próby należy dołączyć informacje dotyczące objawów choroby i okoliczności śmierci zwierzęcia. Wskazany kontakt z pracownią (tel. 52 339 82 19) w celu uzupełnienia wywiadu.